

スロープ

スロープの長さ選びは、傾斜角度を目安に決めましょう。



スロープ

介護給付	予防給付
サービスコード：171008	671008
特別地域：178008	678008

スロープの選び方

使用場所や用途に合わせてスロープをお選びください。車いすの車種や車いす利用者の体重、介助する方の体力等の条件により、使用できる段差・角度には、個人差があり、スロープ傾斜角度の設定が異なります。

自走用に
傾斜角度

5度

段差の約12倍

例えば段差30cmに
傾斜角度5度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約12倍→
3.6mのスロープ**

が必要になります。

ゆるやかな傾斜です。車いすに乗る方は、ほぼ自走で上れます。下りる時も加速がつきにくいので、余裕をもって走行しやすくなります。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって傾斜角度の設定は異なります。
※電動車いすはスロープの上端部分が車体の裏に当たらないか確認してからご使用ください。
※急な傾斜角度で走行する場合、車いすの重心が後ろにずれるため転倒しやすくなります。

基本の角度
傾斜角度

10度

段差の約6倍

例えば段差30cmに
傾斜角度10度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約6倍→
1.8mのスロープ**

が必要になります。

傾斜角度10度がスロープ選びの基本になります。電動車いす自走はもちろん、介助の方がより楽に車いすを押すことができます。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって傾斜角度の設定は異なります。

狭い場所に
傾斜角度

15度


段差の約4倍

例えば段差30cmに
傾斜角度15度で
スロープを設置したいとき
**30cmの約4倍→
1.2mのスロープ**

が必要になります。

かなり急な傾斜になります。傾斜角度15度以上の使用はおやめください。
※介助の方の体力、車いすの車種などの条件によって傾斜角度の設定は異なります。
※急な傾斜角度で走行する場合、車いすの重心が後ろにずれるため転倒しやすくなります。

レールタイプ 必要な場所へ持ち運んですぐに使用できます。

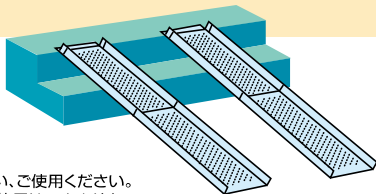

※介助の人が付き添い、ご使用ください。また、電動3輪車の使用はできません。

特徴1

設置しやすい

1本ずつ運べるから、ひとりでも設置が簡単です。


特徴2

運びやすい

軽量。多くの製品は取っ手やキャリングケースが付いています。

1枚板タイプ 車いす、電動・4輪車などに使用できます。

折りたたみタイプや常設タイプ、簡易タイプなど用途に合わせて機種をお選び下さい。

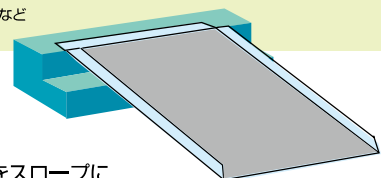

特徴1

安定感がある

レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がなく、ゆとりを持って走行できます。

特徴2

介助しやすい

介助の方は、スロープの走行面に一緒に乗ることができるので、腕の位置が変わらず楽に押せます。

特徴3

活動範囲が広い

車いすはもちろん電動・4輪車にも対応。

スロープ

スマートスロープ

ランドルコーポレーション

- 開閉スロープの中では最小の細身設計。
- 厳しい実走行試験をクリアした安心の強度。
- 簡単に持ち運びができる。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	全長	幅	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号
CA-S075	75cm	69.5cm	約5.0kg	300kg	00496-000303	28-9616-1
CA-S100	100cm	69.5cm	約6.0kg	300kg	00496-000297	28-9611-1
CA-S125	125cm	69.5cm	約8.0kg	300kg	00496-000298	28-9612-1
CA-S150	150cm	69.5cm	約9.0kg	300kg	00496-000299	28-9613-1
CA-S175	175cm	69.5cm	約10.0kg	300kg	00496-000300	28-9614-1
CA-S200	200cm	69.5cm	約11.0kg	300kg	00496-000301	28-9615-1
CA-S225	225cm	69.5cm	約14.0kg	300kg	00496-000304	28-9617-1

素材／中材：ポリスチレン、本体：アルポリック、すべり止めシート：ポリ塩化ビニル、側壁：アルミ

ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

New!

- 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。
- サイズ展開も7サイズあり、様々な住宅環境に適応可能です。
- 軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】


品名	全長	幅	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号
R-85Z	85cm	69.6cm	約4.3kg	300kg	00532-000054	28-0950-1
R-125Z	125cm	69.4cm	約5.7kg	300kg	00532-000053	28-0951-1
R-165Z	165cm	69.4cm	約7.0kg	300kg	00532-000052	28-0952-1
R-205Z	205cm	69.4cm	約8.5kg	300kg	00532-000051	28-0953-1
R-230Z	230cm	69.6cm	約9.6kg	300kg	00532-000050	28-0954-1
R-255Z	255cm	69.6cm	約10.5kg	300kg	00532-000049	28-0955-1
R-285Z	285cm	69.6cm	約11.5kg	300kg	00532-000048	28-0956-1

ダンスロープエア-

ダンロップホームプロダクツ

在庫限定

- スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスダンスロープエア-を開発。
- 全サイズ71.0cm以下の幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。

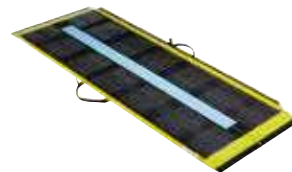

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	全長	幅	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号
R-65A	65cm	70.4cm	約3.5kg	300kg	00532-000028	28-0940-1
R-100A	100cm	70.4cm	約4.5kg	300kg	00532-000027	28-0941-1
R-120A	120cm	70.4cm	約5.0kg	300kg	00532-000026	28-0942-1
R-150A	150cm	70.4cm	約6.0kg	300kg	00532-000025	28-0943-1
R-175A	175cm	70.4cm	約7.0kg	300kg	00532-000024	28-0944-1
R-200A	200cm	70.4cm	約8.0kg	300kg	00532-000023	28-0945-1
R-245A	245cm	71cm	約10.0kg	300kg	00532-000030	28-0946-1
R-285A	285cm	71cm	約11.0kg	300kg	00532-000029	28-0947-1

素材／カーボンFRP

特殊寝台及び
特殊寝台付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす及び
付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
処理装置

身体装
着型
移動支援機器

段差があってもスロープがあれば大丈夫。車いす、電動車いすでの行動範囲が広がります。

ケアスロープ

ケアメディックス

- 幅70cmの使いやすいスロープです。
- 今まで入らなかった間口にも対応!
- 走行面の視認性を高め安全に走行可能。
- アルミ製の脱輪防止エッジの採用。衝撃に強く、丈夫で安心。
- 上端部に設置ラインを表示。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

課税



品名	全長	幅	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号
CS-65	65cm	70cm	約3.0kg	300kg	00093-000015	28-0232-1
CS-100	100cm	70cm	約5.0kg	300kg	00093-000016	28-0233-1
CS-120	120cm	70cm	約6.0kg	300kg	00093-000017	28-0234-1
CS-150	150cm	70cm	約8.0kg	300kg	00093-000018	28-0235-1
CS-175	175cm	70cm	約9.0kg	300kg	00093-000019	28-0236-1
CS-200	200cm	70cm	約10.0kg	300kg	00093-000020	28-0237-1
CS-240C	240cm	70cm	約12.0kg	300kg	00093-000021	28-0238-1
CS-285C	285cm	70cm	約15.0kg	300kg	00093-000038	28-0240-1




素材 / FRP、アルミ

課税

ケアスロープJ

ケアメディックス

- 業界初の連結式スロープでさらなる高段差に対応。
- スロープ2台を専用ジョイント台に組み合わせる事で高段差に対応できます。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬が容易です。ケアスロープ
- 設置場所に応じて脚部の高さ調整ができます。
- 組み合わせにより80cmの段差も解消できます。
- 最長で約5m70cmの長尺スロープになります。

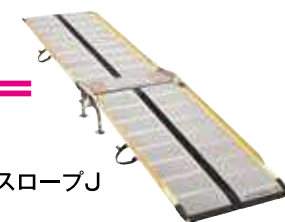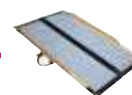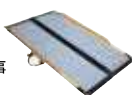

ジョイント台

ケアスロープ

ケアスロープJ

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

課税

品名	全長	幅 (傾斜パーツ)	幅 (傾斜パーツ)	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号
CSJ-300	313cm	70cm	78cm	約28kg	300kg	00093-000022	28-0241-1
CSJ-325	338cm	70cm	78cm	約29kg	300kg	00093-000023	28-0242-1
CSJ-350	363cm	70cm	78cm	約30kg	300kg	00093-000024	28-0243-1
CSJ-350W	363cm	70cm	78cm	約30kg	300kg	00093-000044	28-0246-1
CSJ-375	388cm	70cm	78cm	約31kg	300kg	00093-000045	28-0247-1
CSJ-390	403cm	70cm	78cm	約32kg	300kg	00093-000025	28-0244-1
CSJ-400	413cm	70cm	78cm	約32kg	300kg	00093-000048	28-0248-1
CSJ-415	428cm	70cm	78cm	約33kg	300kg	00093-000046	28-0249-1
CSJ-435	448cm	70cm	78cm	約35kg	300kg	00093-000043	28-0245-1
CSJ-440	453cm	70cm	78cm	約34kg	300kg	00093-000049	28-0250-1
CSJ-460	473cm	70cm	78cm	約36kg	300kg	00093-000047	28-0252-1
CSJ-480	493cm	70cm	78cm	約36kg	300kg	00093-000051	28-0251-1
CSJ-485	498cm	70cm	78cm	約37kg	300kg	00093-000050	28-0253-1
CSJ-525	538cm	70cm	78cm	約39kg	300kg	00093-000052	28-0254-1
CSJ-570	583cm	70cm	78cm	約42kg	300kg	00093-000053	28-0255-1

素材 / 繊維強化プラスチック、アルミ

課税

設置例



ケアスロープJ早見表

CS-150	CSJ-300 TAIS 00093-000022	CS-175	CSJ-350W TAIS 00093-000044	CS-200	CSJ-400 TAIS 00093-000048	CS-240C	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C	CSJ-570 TAIS 00093-000053
CS-175	CSJ-325 TAIS 00093-000023	CSJ-350W TAIS 00093-000044	CS-200	CSJ-400 TAIS 00093-000048	CS-240C	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C	CSJ-570 TAIS 00093-000053	
CS-200	CSJ-350 TAIS 00093-000024	CSJ-375 TAIS 00093-000045	CSJ-400 TAIS 00093-000048	CS-240C	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C	CSJ-570 TAIS 00093-000053		
CS-240C	CSJ-390 TAIS 00093-000025	CSJ-415 TAIS 00093-000046	CSJ-440 TAIS 00093-000049	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C	CSJ-570 TAIS 00093-000053			
CS-285C	CSJ-435 TAIS 00093-000043	CSJ-460 TAIS 00093-000047	CSJ-485 TAIS 00093-000050	CSJ-525 TAIS 00093-000052	CSJ-570 TAIS 00093-000053				

* CS-150~CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。

特殊履台及び特殊履台付属品

体位変換器

床ずれ防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす及び車いす付属品

移動用リフト

リフトの用具

自動排泄処理装置

身体装束着型移動支援機器

LスロープFK

シコク

- 狭く動線の曲がった玄関などにも設置することができる可搬型スロープ。
- 下部部が細かく分かれているため、斜めの設置面にも対応が可能。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	全長	幅	重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号	
LスロープFK1000	210cm	74cm	約25kg	300kg	01235-000173	28-4140-1	課税
LスロープFK1250	325cm	74cm	約26.5kg	300kg	01235-000174	28-4141-1	
LスロープFK1500	360cm	74cm	約28kg	300kg	01235-000175	28-4142-1	
LスロープFK1750	385cm	74cm	約29.5kg	300kg	01235-000176	28-4143-1	
LスロープFK2000	410cm	74cm	約31kg	300kg	01235-000177	28-4144-1	

素材／アルミ、FRP、樹脂

ポータブルスロープ

イーストアイ

- 玄関やちょっとした段差に便利なスロープ。
- 認識しやすいオレンジカラーのついたエッジで脱輪を防止。
- 車いす・介助者はもちろん、電動3輪4輪車いすも使用OK。
- 床固定用穴が4ヶ所あるので住宅改修にも対応可。



【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	全長	1本の幅	1本の重さ	耐荷重	TAISコード	お申込番号	
PEK-025	25cm	69.5cm	約1.5kg	180kg	00465-000091	28-6307-1	課税
PEK-040	40cm	69.5cm	約2.6kg	180kg	00465-000092	28-6308-1	
PEK-060	60cm	69.5cm	約3.9kg	180kg	00465-000093	28-6310-1	
PEK-090	90cm	69.5cm	約5.9kg	180kg	00465-000094	28-6312-1	

素材／アルミ

インタースロープ

モルテン

- ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



●靴下でも安心



●つまずきにくい形状

●滑りにくい表面形状



耐久性の高い特殊な素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	高さ(cm)	奥行(cm)	幅(cm)	勾配角度	重量(kg)	TAISコード	お申込番号	
MSRP1076	1	3	76	14	0.1	00054-000173	28-9628-1	課税
MSRP1576	1.5	5	76	14	0.25	00054-000174	28-9629-1	
MSRP2076	2	7	76	14	0.39	00054-000175	28-9630-1	
MSRP2576	2.5	9	76	14	0.56	00054-000176	28-9631-1	
MSRP3076	3	11	76	14	0.75	00054-000177	28-9632-1	
MSRP3576	3.5	13	76	14	1.0	00054-000178	28-9633-1	
MSRP4076	4	15	76	14	1.1	00054-000179	28-9634-1	
MSRP4576	4.5	17	76	14	2.1	00054-000180	28-9635-1	
MSRP5076	5	19	76	14	2.9	00054-000181	28-9636-1	
MSRP5576	5.5	21	76	14	2.6	00054-000182	28-9637-1	
MSRP6076	6	23	76	14	3.7	00054-000183	28-9638-1	
MSRP6576	6.5	25	76	14	4.7	00054-000184	28-9639-1	

素材／特殊エラストマー

※スロープの適応段差は車いすの種類やご利用者および介助者の体力などにより変化します。福祉用具専門相談員にご相談ください。

特殊寝台及び
特殊寝台付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす及び
車いす付属品

移動用リフト

リフトの吊り具

自動排泄
処理装置

身体装着型
移動支援機器

ダイヤスロープ10 シンエイテクノ **New!**



- 勾配を10度、奥行きを長めに変更。
- 両サイドにゆるやかな勾配をつけ、車いすも回転しやすく、廊下を歩く時につまづきにくい仕様に。

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	高さ(cm)	奥行(cm)	有効幅(cm)	勾配度数	TAISコード	お申込番号
DS10・80-15	1.5	7.8	80	10	01115-000041	28-0599-1
DS10・80-20	2	10.6	80	10	01115-000042	28-0600-1
DS10・80-30	3	16.3	80	10	01115-000044	28-0601-1
DS10・80-35	3.5	19.2	80	10	01115-000045	28-0601-2
DS10・80-40	4	22	80	10	01115-000055	28-0602-1
DS10・80-45	4.5	25	80	10	01115-000056	28-0604-1
DS10・80-50	5	27.8	80	10	01115-000057	28-0603-1

課税

素材／硬質ゴム

ダイヤスロープ (DS76シリーズ) ダイヤスロープ屋外用 (DSO76シリーズ) ダイヤスロープR (DS100シリーズ) シンエイテクノ



(DS76・DS100シリーズ)



歩く人も、車いすを押してもらって出入りする人にも安心な角度設定です。

- ゴム製スロープはクッション性があり、車いすの走行時には車輪の振動を吸収し、体にショックを与えません。

(DS76-05-55-60-75-80-85-95-100)
(DSO76-60-75-80-85-95-100)
(DS100-55-60)を除く

【スロープ寸法及び解消段差早見表】

品名	高さ(cm)	奥行(cm)	幅(cm)	勾配度数	TAISコード	お申込番号
DS76-05	0.5	3.5	76	7	01115-000040	28-0516-1
DS76-10	1.0	3.5	76	14	01115-000018	28-0500-0
DS76-15	1.5	5.5	76	14	01115-000005	28-0500-1
DS76-20	2.0	7.5	76	14	01115-000006	28-0501-1
DS76-25	2.5	9.5	76	14	01115-000007	28-0501-2
DS76-30	3.0	11.5	76	14	01115-000008	28-0502-1
DS76-35	3.5	13.5	76	14	01115-000009	28-0502-2
DS76-40	4.0	15.5	76	14	01115-000010	28-0503-1
DS76-45	4.5	17.5	76	14	01115-000011	28-0503-2
DS76-50	5.0	20.0	76	14	01115-000012	28-0504-1
DS76-55	5.5	20.0	76	15.5	01115-000016	28-0504-2
DS76-60	6.0	20.0	76	17	01115-000017	28-0505-1
New! DS76-70	7.0	27.3	76	14	01115-000032	28-0512-1
New! DS76-75	7.5	27.3	76	15.1	01115-000033	28-0512-2
New! DS76-80	8.0	27.3	76	16.1	01115-000034	28-0513-1
New! DS76-85	8.5	27.3	76	17.1	01115-000035	28-0513-2
New! DS76-90	9.0	35.4	76	14	01115-000036	28-0514-1
New! DS76-95	9.5	35.4	76	14.8	01115-000037	28-0514-2
New! DS76-100	10.0	35.4	76	15.6	01115-000038	28-0515-1
New! DSO76-10	1.0	3.5	76	14	01115-000059	28-0518-1
New! DSO76-20	2.0	7.5	76	14	01115-000061	28-0519-1
New! DSO76-25	2.5	9.5	76	14	01115-000062	28-0519-2
New! DSO76-30	3.0	11.5	76	14	01115-000063	28-0520-1
New! DSO76-35	3.5	13.5	76	14	01115-000064	28-0520-2
New! DSO76-40	4.0	15.5	76	14	01115-000065	28-0521-1
New! DSO76-50	5.0	20.0	76	14	01115-000067	28-0522-1
New! DSO76-60	6.0	20.0	76	17	01115-000069	28-0523-1
New! DSO76-70	7.0	27.3	76	14	01115-000071	28-0524-1
New! DSO76-75	7.5	27.3	76	15.1	01115-000072	28-0524-2
New! DSO76-80	8.0	27.3	76	16.1	01115-000073	28-0525-1
New! DSO76-85	8.5	27.3	76	17.1	01115-000074	28-0525-2
New! DSO76-90	9.0	35.4	76	14	01115-000075	28-0526-1
New! DSO76-100	10.0	35.4	76	15.6	01115-000077	28-0527-1
DS100-10	1.0	3.5	100	14	01115-000019	28-0506-1
DS100-15	1.5	5.5	100	14	01115-000020	28-0506-2
DS100-20	2.0	7.5	100	14	01115-000021	28-0507-1
DS100-25	2.5	9.5	100	14	01115-000022	28-0507-2
DS100-30	3.0	11.5	100	14	01115-000023	28-0508-1
DS100-35	3.5	13.5	100	14	01115-000024	28-0508-2
DS100-40	4.0	15.5	100	14	01115-000025	28-0509-1
DS100-45	4.5	17.5	100	14	01115-000026	28-0509-2
DS100-50	5.0	20.0	100	14	01115-000027	28-0510-1
DS100-55	5.5	20.0	100	15.5	01115-000028	28-0510-2
DS100-60	6.0	20.0	100	17	01115-000029	28-0511-1

課税

素材／硬質ゴム

※スロープの適応段差は車いすの種類やご利用者および介助者の体力などにより変化します。福祉用具専門相談員にご相談ください。

特殊寝台及び
特殊寝台付属品

体位変換器

防止用具
床ずれ

手すり

歩行補助杖

歩行器

徘徊感知機器

スロープ

車いす及び
車いす付属品

移動用リフト

リフトの用具

処理装置
自動排泄

移動支援機器
身体装置肩型